

Флакон 125 мл
Натриева сол на хиалуронова киселина
Метално сребро
Витамин Е

Показания

Лечение на неинфектирани кожни лезии (напр. охлузвания, ожулвания, напукана кожа, порязвания, малки хирургични рани, локализирани изгаряния от първа и втора степен) при диабетно стъпало, спортно стъпало и декубитални рани.

Как действа

HYALO4 SILVER SPRAY е спрей-суспензия за локално приложение, съдържаща хиалуронова киселина (HA), метално сребро и витамин Е. Хиалуроновата киселина и среброто са комбинирани в матрица (каолин и нишесте) с абсорбиращи свойства. Абсорбцията на ексудата създава среда, която улеснява естествения процес на регенерация на тъканите, образувайки, заедно с HA и среброто, защитна бариера срещу проникването на микроби. Филмообразуващото действие на витамин Е, благоприятства възстановяването на оптималните условия за овлажняване на кожата, като подпомага процеса на реепителизация.

Доза и начин на приложение

- 1) Измийте лезиите преди да приложите спрея.
- 2) Разклатете добре контейнера за няколко секунди преди употреба.
- 3) Като държите контейнера във вертикално положение, напръскайте количество прах, достатъчно да покрие третираната повърхност от разстояние около 15 см.
- 4) Препоръчваме третираната част да се покрие със стерилна марля.
- 5) Прилагайте веднъж или два пъти на ден, в зависимост от състоянието.
- 6) Продуктът се отстранява лесно чрез измиване с физиологичен разтвор

Предупреждения

Външна употреба: не поглъщайте и не вдишвайте.

Избягвайте контакт с очите. Ако възникне контакт, изплакнете обилно с вода.

Избягвайте излагането на третираната зона на слънчева светлина.

Избягвайте директен контакт на спрея с раната.

В случай на нежелана реакция, преустановете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.

Консултирайте се с лекар при продължителна употреба.

Затворете опаковката след употреба.

Да не се използва, ако опаковката е повредена или след изтичане на срока на годност

Състав

Основен компонент: 0,25% натриева сол на хиалуронова киселина

Други компоненти: метално сребро, каолин, царевично нишесте, витамин Е, масло от оризови трици, терпинеол, дисилоксан и пропелент.

Противопоказания

Известна свръхчувствителност към някои от компонентите. Не са известни симптоми на предозиране. Не са известни взаимодействия с лекарства или лекарствени продукти. Бременните жени трябва да се консултират с лекар преди да използват продукта.

Съхранение

Да се съхранява при температура между +5°C и +30°C

Опасност: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: може да се пръсне при нагряване. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50°C . Да се пази далеч от деца.



Партиден № и срок на годност са посочени на дъното на контейнера. Срокът на годност се отнася за правилно съхраняван неувреден продукт. Не съдържа озоноразрушаващи пропелентни газове. След употреба изхвърлете в съответствие с действащите местни разпоредби.

Производител

Nirial Pharma srl
via Lorenzo Mascheroni 27/29
20145 Милано (Италия)

Вносител и дистрибутор за България

НОВУС ЕООД
Пощенска кутия 147; София 1463
+35928586039; +359877192700

office@novus.bg
www.novus.bg

Онлайн дрогерия:

novushealth.bg

Дата на последна редакция на инструкциите за употреба: август 2018

 0051

 REF

Каталожен номер



Пазете сухо



Вижте инструкциите за употреба



30°C

Температурен диапазон



Изхвърлете внимателно след употреба



Използвайте до



Пазете от слънчева светлина



Производител

 LOT

Партиден номер



Опасен изключително запалим аерозол