

# HYALO4

## Start

CE 0373



www.fidiawoundcare.com

**Мехлем за локална употреба**  
**Тубичка 30 г**  
**Натриев хиалуронат, колагеназа**

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

#### Описание на продукта

HYALO4 START е течен мехлем за външно приложение, който съдържа като основна съставка натриев хиалуронат, получен чрез бактериална ферментация, и бактериална колагеназа, получена от непатогенен щам *Vibrio alginolyticus*, като допълнителна съставка на продукта.

HYALO4 START позволява обработка на мястото на раната, благодарение на хидратиращите свойства на хиалуроновата киселина, която подпомага естествения процес на възстановяване и предпазва новата жизнеспособна тъкан. В действителност, процесът на цикатризация на лезията протича по-бързо във влажна среда. Бактериалната колагеназа подпомага оздравяването на раната.

#### Състав

Основна съставка: натриев хиалуронат 0,2%.

Други съставки: колагеназа (не по-малко от 2,0 nkat/g от мазилото<sup>1</sup>), течен лек парафин, бял петролатум.

#### Показания

Локално третиране на хронични рани/язви (например декубитални рани, рани по краката, от съдов произход, диабетни язви). По-специално препаратът е предназначен за осигуряване на оптимална влажна среда и обработка на раната, което подпомага естествения процес на оздравяване.

#### Дозировка и начин на приложение

Раната трябва да бъде почистена и дезинфекцирана преди приложение на продукта. За успешно лечение е необходимо зоната на лезията да бъде достатъчно влажна. Сухите лезии трябва да бъдат навлажнени с физиологичен разтвор (0.9% NaCl) или с разтвор, който се понася добре от тъканите, като например глюкозен разтвор. Твърдите корички трябва да бъдат омекотени с поставяне на влажни превръзки.

Нанасяйте около 2 мм слой от HYALO4 START върху раната веднъж дневно или според предписанията на вашия лекар. Покривайте третираната зона със стерилна превръзка.

#### Бременност и кърмене

По лекарско предписание HYALO4 START може да се използва по време на бременност и кърмене.

#### Противопоказания

Пациенти с известна индивидуална свръхчувствителност към съставките на продукта не трябва да използват HYALO4 START.

<sup>1</sup>Катал (символ:kat) е единицата за каталитична активност на Международната система за мерни единици. [Номенклатурен комитет на Международния съюз по биохимия (NC- IUB) (1979).]

## Предупреждения и предпазни мерки

Препоръчва се продуктът да не се използва повече от 30 дни.  
Консултирайте се с вашия личен лекар в случай на усложнение на инфекцията. По време на употреба на HYALO4 START не трябва да прилагате локално тетрациклин.

· Продуктът не трябва да се използва едновременно със сапун/детергенти, дезинфектанти, съдържащи кватернерни (четвъртични) амониеви сили, сребро и други тежки метали, които могат да отслабят неговото действие. Обърнете се към вашия лекар за препаратите, които можете да използвате.

- Да не се прилага върху открити хрущяли или сухожилия.
  - Да се избягва контакт с очите и лигавицата.
  - Незабавно се консултирайте с лекар в случай на неволно поглъщане или вдишване.
  - Да се избягва пряк контакт на тубичката с раната.
  - Поставете обратно капачката на тубичката след всяка употреба.
  - Да не се използва, ако опаковката е увредена.
  - Продуктът може да се използва до 36 месеца след първото отваряне на тубичката.
  - Продуктът да не се използва след срока на годност, указан на опаковката.
  - Срокът на годност се отнася до правилно съхранявани продукти.
  - След употреба да се третира съгласно приложимото национално законодателство.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

## Нежелани реакции

Възможни са нежелани локални реакции, като болка, сърбеж, парене или зачервяване. При пациенти с известна свръхчувствителност към съставките на продукта не могат да се изключат нежелани системни реакции.

## Съхранение

Да се съхранява при температура под +30°C.

Да не се замразява.

Опаковки

Тубички от 15 г, 30 г и 50 г.

## Производител

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD) Италия

## Вносител и дистрибутор за България

НОВУС ЕООД

Пощенска кутия 147; София 1463

+35928586039; +359877192700

[office@novus.bg](mailto:office@novus.bg)

[www.novus.bg](http://www.novus.bg)

## Онлайн дрогерия:

[novushealth.bg](http://novushealth.bg)



Вижте инструкциите за употреба



Партиден номер



Температурен диапазон



Използвайте до



Не използвайте ако  
опаковката е увредена



Производител

Дата на последна редакция на указанията за употреба: Януари 2014 г.