

THEANYABAK®

Този продукт е медицинско изделие. Моля, прочетете инструкцията преди употреба.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

ПОКАЗАНИЯ

THEANYABAK е предназначен за овлажняване и смазване на окото при чувство на сухота или умора на очите.

THEANYABAK също е предназначен за смазване на лещите в случай на дискомфорт от контактните лещи.

Само за очно приложение.

ПОДХОДЯЩ ЗА

- Възрастни
- Деца: родителите или лицата, които се грижат за тях, трябва да прилагат продукта
- Бременни или кърмещи жени въз основа на текущите познания
- Носещи всички видове контактни лещи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте THEANYABAK, ако сте алергични към някоя от съставките му (вж. Описание на изделието).

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

THEANYABAK е разтвор за очно приложение, съдържащ хиалуронова киселина (под формата на натриев хиалуронат 0,15%), натриев хлорид, триметамол, хлороводородна киселина и вода за инжекции.

THEANYABAK е стерилен, без фосфати, изотоничен и рН неутрален разтвор.

Разтворът се предлага в АВАК® мултидозова бутилка. Това иновативно и патентовано устройство дава възможност за прилагане на капките за очи през 0,2 µm филтър, предпазващ разтвора от бактериално замърсяване, без наличието на каквито и да е консерванти.

Следователно, THEANYABAK е нежен за очите, тъй като не съдържа консерванти. Липсата на консерванти позволява защита на очните тъкани и не предизвиква реакции при потребители, които са чувствителни към консерванти.

ПОЛЗА, ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

THEANYABAK се препоръчва за овлажняване и смазване на очите в случай на сухота или умора на очите, причинени от външни фактори, като вятър, тютюнев дим, замърсяване, прах, суха топлина, климатик, пътуване или продължително стоене пред екрана на компютър. Той осигурява незабавно облекчение и комфорт на очите през целия ден.

THEANYABAK се препоръчва и за лицата, носещи контактни лещи. Той смазва и овлажнява лещите, улеснява поставянето или отстраняването им, както и позволява носенето им през целия ден.

Основната съставка на THEANYABAK е хиалуроновата киселина (под формата на натриев халуронат), естествен полизахарид, намиращ се нормално в човешкото око, който задържа водата за хидратиране (овлажняване) и смазване на повърхността на окото. Той задържа разтвора върху повърхността на окото, осигурявайки продължително облекчение и съкращение на времето за заздравяване на очната повърхност.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Не е необходимо специално обучение преди прилагането на THEANYABAK.

Измийте добре ръцете си преди употреба.

Не използвайте каквито и да е инструменти за отваряне на бутилката.


Когато използвате за първи път THEANYABAK, ще забележите, че за отделянето на първата капка е необходимо повече време, поради уникалната филтрираща система в бутилката (вж. Описание на изделиято).

След употреба, поставете отново капачката върху бутилката.

За овлажняване и смазване на окото:

Дозировка: 1 капка във всяко око, колкото пъти е необходимо през деня.

Поставете една капка върху вътрешната повърхност на долния клепач, като леко издърпате долния клепач надолу и погледнете нагоре. Затворете внимателно окото след поставяне на капката.

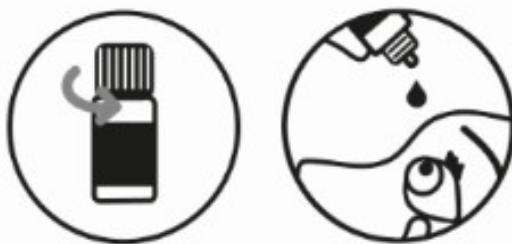

За смазване и хидратиране на лещите:

Дозировка: 1 капка върху всяка леща при поставянето или свалянето ѝ, както и колкото пъти е необходимо през деня.

Преди да сложите контактните си лещи, просто поставете една капка във вътрешната вдлъбната част на лещата, когато е върху пръста Ви.

Сложете контактните си лещи както обикновено и мигнете няколко пъти, за да спомогнете за равномерното разпределение на THEANYABAK върху окото и повърхността на контактните лещи.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът е предназначен за многократна употреба от един пациент.

Не преотстъпвайте бутилката на други хора, за предпазване от така нареченото кръстосано замърсяване.

Проверете дали опаковката не е повредена преди първото използване на този продукт.

Проверете дали обезопасителния пръстен на бутилката е цял преди първото ѝ използване. За да избегнете замърсяване, не позволявайте върха на бутилката да докосва каквато и да е повърхност. Трябва да потърсите лекарска помощ, ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не инжектирайте и не поглъщайте.
Вие не трябва да шофирате или да работите с машини, ако след употреба зрението Ви е замъглено: изчакайте няколко минути, докато зрението Ви се възстанови.
Изчакайте поне 10 минути преди прилагането на друг очен продукт.
Никога не разреждайте ТНЕАНУАВАК или не го смесвайте с други разтвори.
Ако бъде изложена на ниско атмосферно налягане, бутилката може да протече след първата употреба.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Съобщавани са следните нежелани реакции: рядка възможност за дразнене на очите, алергични реакции, болка в очите, усещане за чуждо тяло, замъглено зрение и зачервяване на очите. В тези случаи, носещите контактни лещи трябва да ги свалят.

Когато използвате капки за очи, може да изпитате обезпокоителни симптоми като усещане за парене в окото или чувство на “щипане” в окото за кратко време.

Ако забележите някакви нежелани реакции или необичайно усещане след употребата на този продукт, моля консултирайте се с Вашия лекар и съобщете тази информация на локалния дистрибутор, производителя или Вашия локален здравен орган (вж. информацията за контакт в края на инструкцията за употреба).

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Да се съхранява между 8°C и 30°C.
Не излагайте Вашия продукт на пряка слънчева светлина или влажност.
Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец, в случай че опаковката не е била отворена и е съхранявана правилно.
Продуктът може да се използва в продължение на 6 месеца след първото отваряне. След този период, изхвърлете останалия продукт, съгласно изискванията.
Проявете отговорност при изхвърлянето на продукта, съгласно локалните разпоредби (бутилката трябва да се изхвърли в контейнера за домашни отпадъци; картонената опаковка и листовката могат да бъдат рециклирани).

Дата на издаване и номер на версията на инструкцията за употреба: Ver.5 11/2023

ТНЕАНУАВАК® е търговска марка на Laboratoires Théa.
©2024, Laboratoires Théa. All rights reserved.

Производител:
Laboratoires Théa



CE 0459

Стр. 3 | 5

12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Франция
www.laboratoires-thea.com
Раздел «Contact us»


Дистрибутор:

Теа Фарма ЕООД, София 1113, бул. “Шипченски проход” 18,
Търговски център Галакси, офис 110, България

Здравни органи:

Изпълнителна агенция по лекарствата, София 1303, ул. “Дамян Груев” 8, България

ЗНАЧЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ НА ОПАКОВКАТА

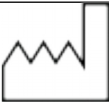	Производител		Медицинско изделие
	Партида		Прочетете инструкцията за употреба
	Дата на производство		Един пациент- Многократно използване
	Годен до		Не използвайте, ако опаковката е повредена
	Температурни условия на съхранение		Внимание
	Стерилизиран чрез асептични техники		Каталожен номер
	Да се пази от пряка слънчева светлина		Да се съхранява на сухо място
	Уникален идентификатор на изделието		Единична стерилна барьерна система със защитна външна опаковка