

Ръководство за употреба на максимален термометър EUROPHARMA

Максимален термометър без живак е медицински стъклен термометър за измерване на телесната температура. Течността в термометърът не е живак, но е алтернативна течност от метали – галий, индий, калай и цинк. Тези метали са абсолютно безвредни и нетоксични за човешкият организъм и околната среда.

Термометърът и направен в съответствие с Европейските Директиви на EU 93/94/EEC:1993 за също и с EUROPEAN STANDART EN 12470-1:2000 и A1:2009 (част 1 стъклени термометри с максимална течност при измерване).

Инструкции за употреба:

ПОЧИСТЕТЕ ТЕРМОМЕТЪРА ПРЕДИ И СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ!

Преди използване се уверете че течността в термометъра е малко под 35°C. Избягвайте допълнителното сваляне на скалата защото това ще рефлектира на времето на измерване. За да се свали течността в скалата трябва да се хване термометъра в предната част и с резки движения на китката да се разтърси.

Изберете какъв метод на измерване желаете – орален, ректален, аксиларен (подмишница) и използвайте за не по-малко от 4 минути, за да се избегнат грешки.

Температурата се определя по разграфената скала от 35-42°C. Визуализацията на стълба на скалата се постига с леко наклоняване на термометъра докато се държи хоризонтално.

Предупреждения:

Не използвайте термометъра за орално измерване при деца под 10 години. Предпочита се използване на ректалният или подмишница метод при подрастващи деца. Оралният метод изисква да не се дъвчи, говори и мърда по време на измерването.

В случай на счупване и изтичане на течността от термометъра използвайте парче плат или подходящ адсорбиращ материал в комбинация със сапун и вода и почистете спокойно мястото. Събраният материал може да се изхвърли като нормален домашен боклук без никакъв проблем, защото той е нетоксичен!

Дръжте термометърът далече от деца!

Не използвайте термометърът, ако се съмнявате че е дефектен или счупен!

Избягвайте потенциални падания и изпускане на термометъра и оставането му на неохранявани места, откъдето може да падне.

Характеристика: Състав – индий, галий, калай, цинк. Продължителност на измерване – най-малко 4 минути. Скала – от 35-42°C. Точност – 0,1°C. Съхранение – от -15 до 42°C.

Гаранция: при правилно съхранение и използване продукта според условията на това ръководство продукта има 1 година гаранция. Гаранцията не покрива увреждане и счупване на продукта вследствие на неправилна употреба.

Гаранцията е валидна при предоставяне на касова бележка !

Продавач:

Купувач:

Дата: